



## Anleitung zum einsetzen der Velumount Classic Spange

### Schritt 1

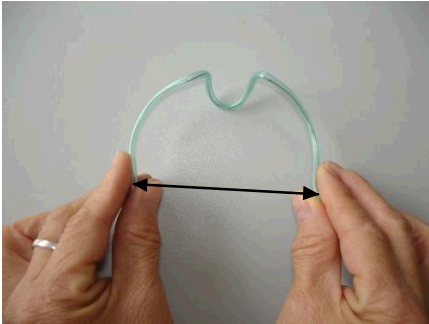


Legen Sie den Velumount so vor sich hin, dass der Pharynx bringen, bogen nach unten schaut. Halten Sie nun die Spange mit nach dem Daumen und Zeigefinger an den **2 Eckpunkten** fest.

### Schritt 2

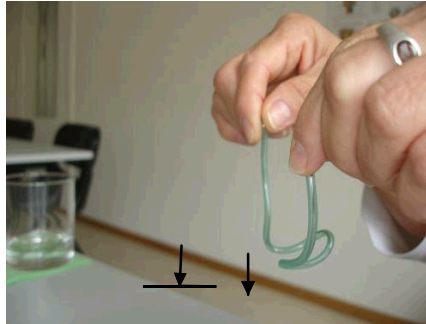

Nun drehen Sie die Spange nach unten, so dass der Bogen zu Ihnen gerichtet ist.

### Schritt 3

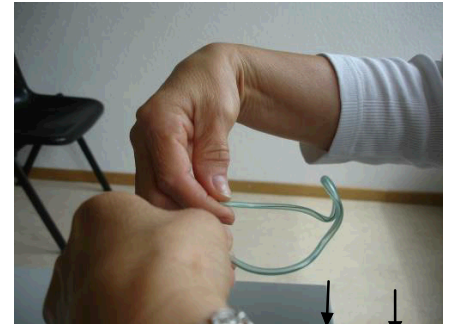


Um den Velumount in die richtige horizontale Position zu

drehen Sie die Spange nach innen. Jetzt ist der Bogen

oben gerichtet.

### Schritt 4

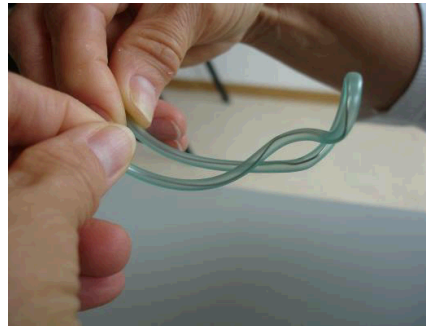

Jetzt die Hände nach aussen drehen. Damit sich der Velumount richtig einsetzen lässt, achten Sie auf die richtige Drehung. Vor dem Einsetzen sollte die Spange diese Löffelform (1. Bild oben) darstellen.

### Schritt 5



#### TIPP:

Damit das Einführen besser klappt kann es hilfreich sein beim Einsetzen „aaaaaa“ zu sagen oder ein Gähnen zu simulieren. Das hebt das Gaumensegel hoch.

Die Spange auf Mundhöhe bringen und den Velumount in den Mund einführen, bis die Daumenkuppen die Mundwinkel berühren. Jetzt müssen Sie nur noch die Lippen schliessen, den Velumount noch etwas hineinschieben und die kurzen Schenkel nach oben drehen (so wird der Pharynxbogen aufgerichtet und die

Schenkel (innen) ausgeklappt, damit diese ausserhalb der Zahnreihe liegen).